

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...). Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles. Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient. En cas d'incident grave en lien avec le dispositif, merci d'en informer le fabricant et l'administration compétente.

## ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon (max. 30 °C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas utiliser de détergent.



Conserver le produit à température ambiante.



Dispositif médical de classe I

### Pour la France :

Distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes

Pour toutes informations complémentaires, contacter :

SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.

NOT\_AttellePouce\_ManuEasy\_181127\_OrV0

### All countries :

 **ORLIMAN S. L. U.**

C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliana

Apdo. de correos 49 - C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona Valencia

España (Spain)

LB-I-SME- / L172 - Édition : 12/18



MANU EASY®

› ATTELLE DE POUCE



## CONTENU/DESCRIPTION

Une attelle de pouce Manu Easy® :

- 1 éclisse de pouce modelable et adaptable préformée ,
- 1 système de fermeture par lacet.

Une notice du produit, à lire attentivement.

## INDICATIONS

Rhizarthrose, Entorse de la métacarpophalangienne (MCP), Lésion articulaire et ligamentaire du pouce, Lésions sportives (ex. : pouce du skieur).

## COMPOSITION

Extérieur : 100% Polyester,  
Mousse intérieure : 100% Polyester,  
Intérieur : 100% Coton,  
Éclisses : Aluminium et Polycarbonate.

## TAILLANT

TAILLE	TOUR DE POIGNET (CM)
1	14 - 17
2	17 - 20

## MISE EN PLACE

### A Figures 1 et 2

- Ouvrir les sangles et la languette amovible (fig.1).
- Glisser le pouce dans l'attelle en passant dans le guide (fig.2).

### B Figures 3, 4 et 5

- Ajuster le niveau de serrage en déplaçant la languette amovible (fig.3).
- Refermer la sangle autour du poignet (fig.4) puis celle du pouce (fig.5) à l'aide des fixations auto-agrippantes.

### C

- S'assurer du positionnement et de l'alignement de l'éclisse du pouce en exerçant de légères pressions sur celle-ci.



PLUS D'INFOS SUR  
NOS PRODUITS :  
[www.orliman.fr](http://www.orliman.fr)