

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...).

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué à même la peau avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

En cas d'incident grave en lien avec le dispositif, merci d'en informer le fabricant et l'administration compétente.

## ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon (max. 30 °C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas utiliser de détergent.



Conservé le produit à température ambiante.



  
**ORLIMAN**

# FIXQUICK

Powered by **BOA** FIT SYSTEM

Dispositif médical de classe I  
Distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes  
Pour toutes informations complémentaires, contacter:  
SM Europe, Z.A. La Herbetais, 35520 La Mézière - France.  
NOT\_Fixquick\_Poignet-Pouce\_280818\_OrV0

 **ORLIMAN S. L. U.**

C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliana  
Apdo. de correos 49 · C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona  
Valencia - España (Spain)

LBISME#L168 Edition : 10/2018



ATELLE DE POIGNET-POUCE

## CONTENU/DESCRIPTION

- Une attelle de poignet-pouce Fixquick :
- 1 éclipse palmaire modelable et amovible,
  - 1 éclisse latérale modelable et amovible.

Une notice du produit, à lire attentivement.

## INDICATIONS

Traumatisme et entorse du poignet et du pouce, blessure du scaphoïde, tendinite de De Quervain, rhizarthrose en phase aiguë, immobilisation post-opératoire.

## COMPOSITION

Polyester 30%, Nylon 25%, Caoutchouc naturel 20%, Aluminium 10%, Polypropylène 5%, Polyéthylène 5%, Polyacétal 5%.

 Contient du latex

## TAILLANT

Modèles gauche et droite.

TAILLE	TOUR DE POIGNET (CM)
1	13,5 - 14,5
2	14,5 - 16
3	16 - 17,5
4	17,5 - 19

## MISE EN PLACE

### A (figure 1)

- Enfiler l'attelle de poignet-pouce Fixquick comme un gant en passant le pouce dans l'évidement prévu à cet effet.

### B (figure 2 et 3)

- Le disque de serrage possède 2 positions : "verrouillée" quand le disque est enfoncé au maximum et "déverrouillée" quand il est tiré au maximum. Le passage d'un état à l'autre est identifiable par un léger "clic".
- S'assurer que le disque est en position "verrouillée" et procéder au serrage. Tourner le disque dans le sens des aiguilles d'une montre et ajuster la tension à la compression souhaitée.
- Vous pouvez à tout moment ajuster le serrage si ce dernier est trop important en tournant le disque dans le sens opposé.

Une compression excessive peut provoquer des interruptions de type vasculaire, c'est pourquoi nous vous conseillons de régler la compression jusqu'au degré optimal.

### C (figure 4)

- Serrer la sangle de pouce en prenant bien soin de l'ajuster au plus proche de la jointure pouce/index.

### D (figure 5)

- Pour retirer l'attelle, détacher la sangle de pouce, déverrouiller le disque et relâcher les liens en tirant sur l'appendice "demi-lune".



Figure 1



Figure 2

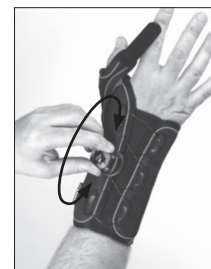


Figure 3



Figure 4

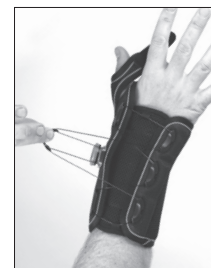


Figure 5



PLUS D'INFOS SUR  
NOS PRODUITS :  
[www.orldiman.fr](http://www.orldiman.fr)