

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...).

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.




Conduite déconseillée.

## ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas utiliser de détergent.



Conserver le produit à température ambiante.

 Retirer les cadrans pour l'entretien	<p>Pour ôter les 2 cadrans articulés latéraux :</p>  <p>Plier la genouillère en direction du genou avant de les retirer en ouvrant les fermetures rétractables par velcro®.</p>
 PAD SILICONE	<p>Les pads en silicone peuvent également être lavés en suivant les instructions de lavage ci-dessus.</p>



**ORLIMAN®**



Dispositif médical de classe I

Distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes

Pour toutes informations complémentaires, contacter :

SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.

NOT\_GenuligStab\_170628\_OrV0

 **ORLIMAN S. L. U.**

C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Elia

Apdo. de correos 49 · C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona

Valencia - España (Spain)

LB-I-SME / L141 - Edition: 09/2017



GENULIG STAB®

» **GENOULLÈRE LIGAMENTAIRE  
ARTICULÉE ET ROTULIENNE**



**ORLIMAN®**

## CONTENU/DESCRIPTION

Une genouillère ligamentaire articulée et rotulienne Genulig Stab® :

- 1 sangle en X permettant un meilleur renfort de l'articulation et une compression progressive,
- 1 sangle en demi-lune,
- 2 cadrans articulés polycentriques crantés,
- 4 ressorts spiralium,
- 1 anneau rotulien amovible,
- 1 pad demi-lune amovible,
- Modèle bilatéral.

Une notice du produit, à lire attentivement.

## INDICATIONS

Lésion et instabilité légère des collatéraux (LLI et LLE) ou rotulienne, Gonarthrose, Affection fémoro-patellaire, Tendinite du Fascia lata ou du tendon rotulien, Traitement de la maladie d'Osgood-Schlatter, Reprise du sport.

## COMPOSITION

- Polyuréthane 42 %,
- Polyamide 28 %,
- Polyester 15 %,
- Élasthane 9 %,
- Coton 6 %,
- Pad : 100 % Silicone.

## TAILLANT

TAILLE	TOUR DE CUISSE (CM)
1	39 - 47
2	47 - 53
3	53 - 60
4	60 - 67
5	67 - 75



PLUS D'INFOS SUR  
NOS PRODUITS :  
[www.orliman.fr](http://www.orliman.fr)

## MISE EN PLACE

**A** (figure 1)

- Retirer tous les accessoires du produit.
- Ouvrir la genouillère.

EN FONCTION DE LA PRESCRIPTION MÉDICALE OU DE LA PATHOLOGIE :

- Placer l'anneau rotulien ou le pad demi-lune à l'intérieur de la genouillère à l'aide du côté Velcro®.
- Si nécessaire changer les cadrans articulés par les ressorts spiralium.

- Placer la genouillère sur la jambe (légèrement fléchie).
- Vérifier son centrage par rapport à la rotule.

**B** (figure 2)

- Placer sa main dans le passe-doigts situé à l'arrière de la cuisse.
- Ajuster la compression désirée au niveau de la cuisse puis du mollet en fermant les attaches à l'aide des fermetures Velcro®.

**C** (figure 3)

- S'assurer que la compression est adaptée et qu'aucun point de pression ne subsiste.

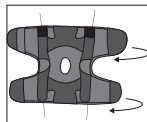


Figure 1

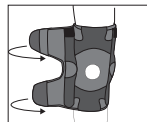


Figure 2


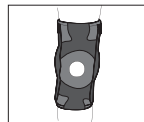


Figure 3

Si nécessaire, placer la sangle en «X» pour un renfort ligamentaire ou la sangle en demi-lune pour un soutien de la rotule selon les indications de votre praticien (cf schémas indicatifs).

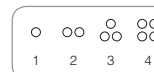

3 positionnements de la sangle en «X». Repérage facile grâce aux marques perforées numérotées de 1 à 4, sur les rabats.

Accessoires à utiliser :  
Anneau rotulien et la sangle en X.

Accessoires à utiliser :  
Pad demi-lune et la sangle demi-lune.

Mise en place pour  
**Ligaments collatéraux**



**ÉTAPE 1**

Mise en place par l'avant. Placer la partie évidée de la sangle à l'arrière du genou.



**ÉTAPE 2**

Mettre en place les rabats 1 et 2 en enveloppant le genou. Ajuster jusqu'à un niveau confortable et fixer à l'aide des velcros®.



**ÉTAPE 3**

Terminer en rabattant les sangles 3 et 4 autour de la jambe et ajuster les velcros® jusqu'à ce que l'attelle soit bien en place et le confort optimal.

Mise en place pour  
**Ligaments croisés**



**ÉTAPE 1**

Mise en place par l'arrière. Positionner la partie évidée de la sangle autour de la rotule.



**ÉTAPE 2**

Mettre en place les rabats 1 et 2 en enveloppant le genou. Ajuster jusqu'à un niveau confortable et fixer à l'aide des velcros®.



**ÉTAPE 3**

Terminer en rabattant les sangles 3 et 4 autour de la jambe et ajuster les velcros® jusqu'à ce que l'attelle soit bien en place et le confort optimal.

Mise en place  
**Rotulienne**

Pad demi-lune sur le côté de la rotule.



**MISE EN PLACE**

- Fixer le velcro® latéral de la sangle demi-lune sur le côté lésé du genou.
- Terminer la mise en place en étirant simultanément les extrémités de la sangle autour de la rotule afin que le pad exerce un appui sur la rotule.

Pad demi-lune sur le tendon rotulien.



**MISE EN PLACE (Osgood-Schlatter, Tendinite du tendon rotulien)**

- Centrer et ajuster la position de la sangle demi-lune sous la rotule
- Verrouiller sa position à l'aide du velcro®.
- Terminer la mise en place en étirant les extrémités de la sangle de chaque côté du mollet.