

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...).

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

## ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas utiliser de détergent,



Conserver le produit à température ambiante.



**ORLIMAN.**



Dispositif médical de classe I

Distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes

Pour toutes informations complémentaires, contacter :

SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.

NOT\_ManuEasy\_170111\_OrV0



**ORLIMAN S. L. U.**

C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Elíana

Apdo. de correos 49 · C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona

Valencia - España (Spain)

LB-I-SME/L148 Edition : 02/2017



**MANU EASY®**

**> ATTELLE DE POIGNET-POUCE**



**ORLIMAN.**

## CONTENU/DESCRIPTION

Attelle de poignet-pouce Manu Easy® :

- 1 Éclisse palmaire amovible et modelable,
- 2 Éclisses dorsales amovibles et modelables,
- 1 Éclisse de pouce amovible et modelable,

Une notice du produit, à lire attentivement.

## INDICATIONS

Traumatisme et entorse du poignet et du pouce, blessure du scaphoïde, Tendinite de De Quervain, Rhizarthrose phase aiguë.

## COMPOSITION

Extérieur : 100% Polyester,  
Mousse intérieure : 100% Polyester,  
Intérieur : 100% Coton,  
Éclisses : Aluminium et Polycarbonate.

## TAILLANT

Modèle gauche et droite.

TAILLE	TOUR DE POIGNET (CM)
1	14 - 16
2	16 - 18
3	18 - 20

## MISE EN PLACE

**A** (figure 1)

- Enfiler l'attelle Manu Easy® poignet-pouce et positionner l'éclisse palmaire dans la paume de la main, en prenant bien soin de l'aligner sur l'axe du poignet.

**B** (figures 2 et 3)

- Refermer et serrer les systèmes de lacets dans l'ordre indiqué :
  - 1 Refermer le système à lacets au niveau du poignet.
  - 2 Refermer le système à lacets au niveau de la tranche de la main sur l'éclisse palmaire.
- Ajuster la tension au maintien souhaité.

**C** (figure 4)

- Refermer la sangle autour du pouce en prenant bien soin de l'ajuster au plus proche de la jointure pouce/index.



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



PLUS D'INFOS SUR  
NOS PRODUITS :  
[www.orliman.fr](http://www.orliman.fr)