

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...).

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas utiliser de détergent,



Conserver le produit à température ambiante.



ORLIMAN.



Dispositif médical de classe I

Distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes

Pour toutes informations complémentaires, contacter :

SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.

NOT_ManuEasy_170111_OrV0

ORLIMAN S. L. U.

C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Elíana

Apdo. de correos 49 · C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona

Valencia - España (Spain)

LB-I-SME/LB53 Edition : 02/2017



MANU EASY®

> ATTELLE DE POIGNET



ORLIMAN.

CONTENU/DESCRIPTION

Attelle de poignet Manu Easy® :

- 1 Éclisse palmaire amovible et modelable,
- 2 Éclisses dorsales amovibles et modelables.

Une notice du produit, à lire attentivement.

INDICATIONS

Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion,
Immobilisation post-opératoire, Suspicion de fracture.

COMPOSITION

Extérieur : 100% Polyester,
Mousse intérieure : 100% Polyester,
Intérieur : 100% Coton,
Éclisses : Aluminium et Polycarbonate.

TAILLANT

Modèle gauche et droite.

TAILLE	TOUR DE POIGNET (CM)
1	12 - 16
2	16 - 18
3	18 - 20

MISE EN PLACE

A (figure 1)

- Enfiler l'attelle Manu Easy® et positionner l'éclisse palmaire dans la paume de la main, en prenant bien soin de l'aligner sur l'axe du poignet.

B (figure 2)

- Serrer la sangle principale, ajuster la tension au maintien souhaité puis fixer avec le velcro®.

C (figure 3)

- Serrer la sangle du pouce en la positionnant comme indiqué sur la photo, ajuster la tension pour que votre confort soit optimal puis fixer avec le velcro®.

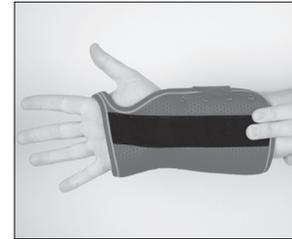


Figure 1

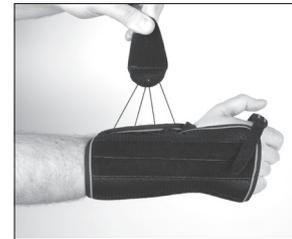


Figure 2

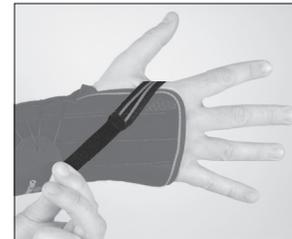


Figure 3



PLUS D'INFOS SUR
NOS PRODUITS :
www.smeurope.fr